



Кровать общебольничная механическая КМ 05

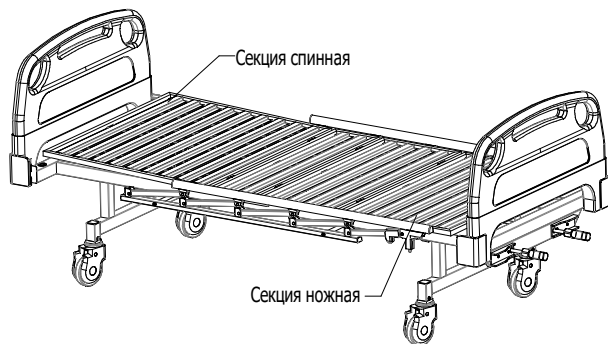

Установка ножек


Соедините ножки кровати с основанием с помощью винтов M8x16 и гаек M8.

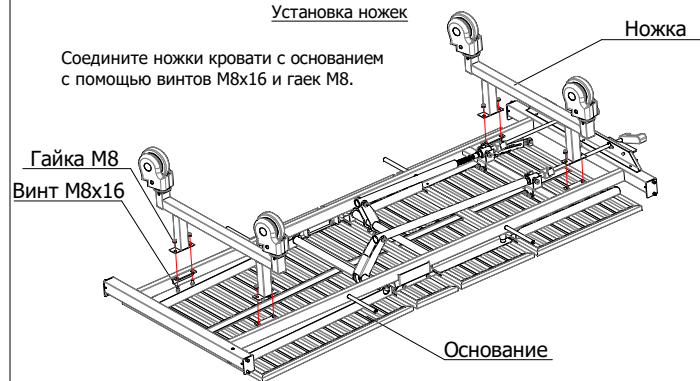

2

Примечание: колеса с тормозом устанавливать по диагонали.

Установка приводов

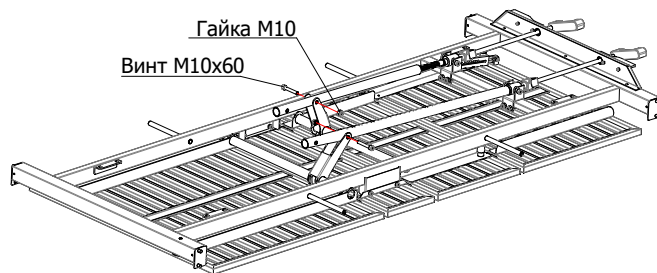

Соедините винтовые приводы с кронштейнами через второе отверстие от края привода с помощью винтов M10x60 и гаек M10. Короткий привод должен быть полностью выкручен.

1

Установка спинок и боковых ограждений



Предварительно снять колпачки защитные с кронштейнов спинок

3